

29.06.2022

<https://medcatalog.by/products/meshok-stomniy-belplastrupp-md-dreniruemyi>

medcatalog

# Мешок стомный БелПласГрупп МД дренируемый

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,  
дренируемый, взрослый, телесный, вместимость  
400 мл, зажим, адгезив

БелПласГрупп ООО, Беларусь



## Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Вместимость	400 мл

Зажим	да
Адгезив	да

## Дополнительные характеристики

---

**Мешок-резервуар сменный дренируемый МД** для двухкомпонентных калоприемников.

**Вырезаемое отверстие:** 38 мм / 45 мм / 57 мм / 70 мм / 100 мм

**Вместимость:** 400 мл

**Маркировка:** МД-38, МД-45, МД- 57, МД-70, МД-100

### **Особенности мешка для калоприемника МД:**

- изготовлен из специальных марок многослойного бесшумного полиэтилена, который обеспечивает изоляцию от кишечных содержимых;
- имеет специальный слой из материала, препятствующий прилипанию мешка к коже;
- при эксплуатации не шуршит, не шелестит;
- в комплект поставки входит зажим.

### **Варианты исполнения мешка МД:**

- с фильтром
- без фильтра

### **Фильтр**

Многослойный фильтр эффективно нейтрализует запах, обеспечивает отток газа из мешка, препятствует раздуванию и слипанию стенок мешка. Фильтр надежно защищён от повреждения твердым и жидким кишечным отделяемым.

Фильтр расположен на наружной стороне мешка. Его необходимо проколоть иглой вместе с мешком. Если газ в емкости продолжает скапливаться и вызывает раздувание стенок, рекомендуется выполнить еще одно отверстие. Оптимальный вариант количества проколов подбирается индивидуально.

### **В упаковке:**

- мешок-резервуар - 10 шт.
- зажим - 5 шт.
- инструкция - 1 шт.