

**Инструкция по применению изделия медицинского назначения**
**Фарингоспрей (Faringospray) спрей**

**Внимательно прочитайте всю инструкцию по применению, так как она содержит важную для Вас информацию.**

Всегда используйте **Faringospray** именно так, как описано в этой инструкции по применению или так, как сказал Вам врач или фармацевт.

**Состав:**

Рафинированное рапсовое масло, облепиховое масло (*Oleum Hippophaes*), масляный экстракт цветков календулы (*Oleum Calendulae*) и масло бергамота (*Oleum Bergamii*).

**Действие и способ применения:**

**Faringospray** – средство, созданное на основе масел, натуральные масла в составе которого покрывают слизистую оболочку полости рта и горла. Это помогает поддерживать слизистую влажной и упругой, уменьшает ощущение дискомфорта и боль, уменьшает раздражающие ощущения в горле и трение, таким образом облегчая процесс глотания.


Средство используют для ухода за полостью рта и горла, для уменьшения раздражения слизистой оболочки рта и горла после различных манипуляций или в случаях воспаления.

Форма распыляющего устройства

**Faringospray** обеспечивает однородное попадание средства на слизистую оболочку и точную дозировку, в свою очередь, масляная основа покрывает слизистую оболочку, предотвращая проникновение новых инфекций.

**Как использовать Faringospray**


1. Возьмите в руку бутылочку и встряхните ее.

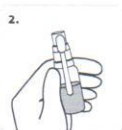

2. Направьте бутылочку распылителем к себе.



3. Поверните наконечник распылителя против часовой стрелки под углом в 90 градусов.



4. Поместите распылитель в рот, как показано на рисунке.

5. Распылите **Faringospray** в полость рта, нажав на головку распылителя 2-3 раза. Держите бутылочку вертикально!

При нажатии на головку распылителя один раз распыляется примерно 200 мг средства.

6. После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и поверните наконечник распылителя в первоначальную позицию.

Средство предназначено для применения одним пользователем.

Использовать 3 раза в день. Желательно повторно распылять средство после еды или питья, чтобы восстановить слой, покрывающий слизистую оболочку полости рта и глотки.

Средство применяют до исчезновения симптомов болезни. Если симптомы (ощущение дискомфорта, боль в горле) не проходят после недели использования данного средства, следует проконсультироваться с врачом. Можно применять детям с 2 лет, детям до 6 лет применять под присмотром родителей.

**Меры предосторожности при использовании:**

Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к какому-либо компоненту продукта. Не допускать попадания средства в глаза! При случайном попадании средства в глаза, незамедлительно промыть глаза проточной водой и проконсультироваться с врачом.

**Хранение:**

Хранить в сухом, недоступном и невидимом для детей месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при комнатной температуре (15–25 °С). Не использовать после окончания срока годности, который указан на упаковке.

**Важно:**

После начала применения необходимо использовать в течение 3 месяцев. Внимание! При попадании на одежду могут появиться пятна.

**Производитель:**

ООО «SILVANOLS», ул. Курбада 2А,  
Рига, LV-1009, Латвия  
[www.silvanols.com](http://www.silvanols.com)

**Упаковка:**

бутылочка объемом 20 мл с распылителем.

**Инструкция по применению изделия медицинского назначения**

**Фарингоспрей (Faringospray) спрей**

**Внимательно прочитайте всю инструкцию по применению, так как она содержит важную для Вас информацию.**

Всегда используйте **Faringospray** именно так, как описано в этой инструкции по применению или так, как сказал Вам врач или фармацевт.

**Состав:**

Рафинированное рапсовое масло, облепиховое масло (*Oleum Hippophaes*), масляный экстракт цветков календулы (*Oleum Calendulae*) и масло бергамота (*Oleum Bergamii*).

**Действие и способ применения:**

**Faringospray** – средство, созданное на основе масел, натуральные масла в составе которого покрывают слизистую оболочку полости рта и горла. Это помогает поддерживать слизистую влажной и упругой, уменьшает ощущение дискомфорта и боль, уменьшает раздражающие ощущения в горле и трение, таким образом облегчая процесс глотания.

Средство используют для ухода за полостью рта и горла, для уменьшения раздражения слизистой оболочки рта и горла после различных манипуляций или в случаях воспаления.

Форма распыляющего устройства **Faringospray** обеспечивает однородное попадание средства на слизистую оболочку и точную дозировку, в свою очередь, масляная основа покрывает слизистую оболочку, предотвращая проникновение новых инфекций.

**Как использовать Faringospray**



1. Возьмите в руку бутылочку и встряхните ее.



2. Направьте бутылочку распылителем к себе.



3. Поверните наконечник распылителя против часовой стрелки под углом в 90 градусов.



4. Поместите распылитель в рот, как показано на рисунке.

5. Распылите **Faringospray** в полость рта, нажав на головку распылителя 2-3 раза. Держите бутылочку вертикально!

При нажатии на головку распылителя один раз распыляется примерно 200 мг средства.

6. После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и поверните наконечник распылителя в первоначальную позицию.

Средство предназначено для применения одним пользователем.

Использовать 3 раза в день. Желательно повторно распылять средство после еды или питья, чтобы восстановить слои, покрывающий слизистую оболочку полости рта и глотки.

Средство применяют до исчезновения симптомов болезни. Если симптомы (ощущение дискомфорта, боль в горле) не проходят после недели использования данного средства, следует проконсультироваться с врачом. Можно применять детям с 2 лет, детям до 6 лет применять под присмотром родителей.

**Меры предосторожности при использовании:**

Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к какому-либо компоненту продукта. Не допускать попадания средства в глаза! При случайном попадании средства в глаза, немедленно промойте глаза проточной водой и проконсультироваться с врачом.

**Хранение:**

Хранить в сухом, недоступном и невидимом для детей месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при комнатной температуре (15-25 °C). Не использовать после окончания срока годности, который указан на упаковке.

**Важно:**

После начала применения необходимо использовать в течение 3 месяцев. Внимание! При попадании на одежду могут появиться пятна.

**Производитель:**

ООО «SILVANOLS», ул. Курбада 2А,  
Рига, LV-1009, Латвия  
www.silvanols.com

**Упаковка:**

бутылочка объемом 30 мл с распылителем.