



ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ АКВА МАРИС® СТРОНГ

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2018/7965 от 21.12.2018 г.

Стерильный гипертонический раствор морской воды.

Содержание NaCl : 21 г/л.

СОСТАВ НА 100 МЛ:

100 мл воды Адриатического моря.
Натуральная вода Адриатического моря содержит ионы Cl⁻, Na⁺, SO₄²⁻, Mg²⁺, Ca²⁺, K⁺, HCO₃⁻, Br⁻, а также микро-элементы, такие как: цинк, селен, йод, железо, марганец и др.
Не содержит консервантов и химических добавок.

ВНЕШНИЙ ВИД:

Прозрачный бесцветный раствор со слабым специфическим запахом.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Спрей назальный Аква Марис® Стронг предназначен для нанесения на слизистую оболочку носа для увлажнения слизистой оболочки и удаления выделений.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для уменьшения отека слизистой оболочки носа, вызванного воспалением или другими причинами;
- для уменьшения заложенности носа;
- для облегчения носового дыхания;
- для удаления вирусов, бактерий, инородных частиц;
- для увлажнения слизистой оболочки;
- для удаления избытка слизи.

ОПИСАНИЕ:

Спрей назальный Аква Марис® Стронг представляет собой гипертонический стерильный раствор морской воды. Гипертонический раствор обеспечивает

уменьшение отека слизистой оболочки полости носа благодаря удалению избыточной жидкости из межклеточного пространства за счет разности осмотического давления.

Применяется при воспалительных заболеваниях носа, носовых пазух и носоглотки для устранения отека слизистой оболочки и облегчения носового дыхания.

Спрей назальный Аква Марис® Стронг способствует повышению местного иммунитета, оказывает местное противовоспалительное и противомикробное действие.

Микроэлементы воды Адриатического моря улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости носа, повышают ее устойчивость к внедрению патогенных микроорганизмов.

Ионы кальция и магния стимулируют движение «реснитчатых клеток» слизистой оболочки, способствующих удалению из полости носа микроорганизмов и инородных частиц, и нормализуют реологические свойства слизи.

Йод, ионы натрия и хлорид-ионы оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи.

Ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Ионы кальция обладают противо-аллергическим действием.

Карбонаты, сульфаты, хлориды нормализуют выработку назальной слизи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для уменьшения отека и облегчения носового дыхания при острых и хронических воспалительных и аллергических заболеваниях полости

носа, придаточных пазух и носоглотки, таких как:

- острые и хронические риниты (в том числе «ринит беременных»);
- острые и хронические синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит);
- назофарингиты.

Для устранения отека слизистой оболочки полости носа, особенно у людей, страдающих повышенной чувствительностью к химическим лекарственным препаратам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Детям с одного года и взрослым по 1-2 впрыскивания несколько раз в день, при необходимости возможно более частое использование. Срок применения не ограничен.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед первым использованием следует снять защитную крышку и нажать на распылитель 2-3 раза для того, чтобы выпустить воздух.

Спрей назальный Аква Марис® Стронг совместим со всеми средствами, используемыми для лечения насморка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не выявлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Может применяться при беременности и лактации.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Редко - чувство дискомфорта в носовой полости в начале приема.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе темного цвета (200 доз), снабженном распылительным устройством и защитной крышкой. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):

Хранить в недоступном для детей месте при температуре + 25±10°C, влажности 45 - 80 %, давлении 84-106.7 кПа.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Спрей назальный Аква Марис® Стронг не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации раствора не требуются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

Место производства:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, Ломоносовский
пр-т, д.38, офис VII, тел./факс:
+7(499)143-33-71.

www.aquamaris.ru

Внимание! В данном документе представлены только основные сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.



АКВА МАРИС®



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата
АКВА МАРИС® Стронг

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛП-000810

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Аква Марис® Стронг

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Спрей назальный

ОПИСАНИЕ

Прозрачный бесцветный раствор со слабым специфическим запахом.

СОСТАВ

Стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря – 100 %.

Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:

Натрий (Na ⁺)	– не менее 7,50 мг/мл;
Кальций (Ca ²⁺)	– не менее 0,25 мг/мл;
Калий (K ⁺)	– не менее 0,20 мг/мл;
Магний (Mg ²⁺)	– не менее 1,00 мг/мл;
Хлориды (Cl ⁻)	– не менее 16,50 мг/мл;
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	– не менее 1,80 мг/мл;
Гидрокарбонаты (HCO ₃ ⁻)	– не менее 0,10 мг/мл;
Бромиды (Br ⁻)	– не менее 0,04 мг/мл.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противоконгестивное средство.

КОД АТХ: R01AX10

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аква Марис® Стронг представляет собой гипертонический стерильный раствор морской воды.

Гипертонический раствор обеспечивает уменьшение отека слизистой оболочки полости носа благодаря удалению избыточной жидкости из межклеточного пространства за счет разности осмотического давления.

Применяется при воспалительных заболеваниях носа, носовых пазух и носоглотки для устранения отека слизистой оболочки, в качестве «природного деконгестанта».

Оказывает антибактериальный эффект.

Аква Марис® Стронг смывает вирусы и бактерии со слизистой оболочки полости носа, способствует повышению местного иммунитета, оказывает местное противовоспалительное действие.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аква Марис® Стронг показан:

- для устранения отека слизистой оболочки полости носа, особенно лицам, страдающим повышенной чувствительностью к химическим лекарственным препаратам, в том числе беременным женщинам и в период лактации.
- для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа,

придаточных пазух и носоглотки – таких как:

- острые и хронические риниты;
- острые и хронические синуситы;
- назофарингиты;
- острые и хронические гаймориты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

детям с 1 года и взрослым по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки в течение 2 недель.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале приема.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения насморка.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки не отмечены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Аква Марис® Стронг не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Спрей назальный. По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета, снабженном распылительным устройством и защитной крышкой из пропилена. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с момента изготовления.

Не использовать после истечения срока годности.

Использовать в течение 45 дней после вскрытия флакона.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Претензии к качеству препарата следует направлять в адрес
Представительства ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. в России
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.33,
тел./факс: (495) 970-18-82, 970-18-83.

