

Инструкция по применению РАСТВОР ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ НОСА И ГОРЛА

«SEA SOFT Multiwave»
СЛАБЫЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
ТУ ВУ 192002495.008-2022

Наименование: Раствор для орошения и промывания носа и горла слабый гипертонический «SEA SOFT Multiwave»

Состав: вода деионизованная, морская соль, гиалуроновая кислота (натриевая соль).

Назначение: Предназначен для применения у взрослых и детей старше шести лет, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки носа, рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой, острых и хронических респираторных заболеваниях полости носа, околоносовых пазух, носоглотки (инфекционных, атрофических). Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения: Оториноларингология

Показания к применению: профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические риниты, синуситы, аденоидиты, фарингиты, тонзиллиты
- вазомоторные и субатрофические риниты
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.).

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта, носа и горле.

Свойства: раствор для орошения и промывания носа и горла слабый гипертонический «SEA SOFT Multiwave» способствуя физическому удалению избытка жидкости и слизи, снимает отек и заложенность носа, носовых пазух, рта и глотки

- Уменьшает заложенность и восстанавливает дыхание при насморке;
- Тщательно промывает все отделы полости носа, рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа, рта и глотки;
- Увлажняет слизистую носовой полости в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе систем центрального отопления, кондиционирования, в условиях неблагоприятной экологической обстановки, а также во время авиаперелетов;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия оболочки полости носа;
- Повышает местный иммунитет.

• Процедура не опасна беременным женщинам, поэтому врачи рекомендуют ее в качестве первой лечебной и профилактической меры при воспалительных патологиях гортани.

• Средство отлично справляется с дискомфортом, покраснением и скоплением гнойно-некротического налета в лакунах миндалин при воспалении вирусной и бактериальной этиологии.

Промывание носа с лечебной целью нужно повторять не менее 4-х раз в сутки. Первую процедуру следует совместить с утренним умыванием, затем повторять через 2 часа после каждого приёма пищи. Лечение повторяется до полного выздоровления.

Не рекомендуется промывать нос морской солью людям, склонным к носовым кровотечениям. Противопоказана эта процедура в тех случаях, если насморк сопровождается острым отитом (воспалением уха), так как струя жидкости может способствовать распространению инфекции на другие отделы ЛОР аппарата. Во всех прочих случаях раствор морской соли приносит только пользу и способствует скорейшему избавлению от насморка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав раствора.

Особые указания:

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.
- Безопасен при проглатывании!

Способ применения:

1. Для санации горла:

Носик распылителя поставить в горизонтальное положение и распылить раствор в горло, 1-3 раза, направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки раствора в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы раствор продолжал действовать 10-15 минут.

2. Для санации носа:

Носик распылителя поставить в вертикальное положение и распылить раствор по 1 разу в каждую ноздрю. Излишки жидкости, попавшие из носа в рот, сплевывают в раковину. Средство должно воздействовать на очаг воспаления не менее 10-15 минут. Повторять процедуру желательно не чаще, чем 1 раз в 2 часа, и не более 5 раз в день.

Внимание: перед применением необходимо встряхнуть флакон!

Побочные эффекты : не выявлены

Меры предосторожности: перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон желательно использовать индивидуально.

Осмотрите препарат и упаковку перед применением. Не используйте раствор в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

Форма выпуска и упаковка: раствор во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия транспортировки: растворы транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение растворов осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С). Не допускать заморозания.

Срок годности: срок годности раствора для орошения и промывания носа и горла слабого гипертонического «SEA SOFT Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 8 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

Стерильность: раствор является нестерильным.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»

Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Центральная, 49, к. 9.

Регистрационное удостоверение МЗ РБ: ИМ-7.111902 от 26.05.2022 г.