

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Капли глазные ОКУТИАРЗ® ГИДРО+, 10 мл во флаконе №1
(без консервантов)**

ОКУТИАРЗ® ГИДРО+

капли глазные

Без консервантов

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Сохраните данный листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к врачу или фармацевту. Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Что такое Окутиарз® Гидро+?

Окутиарз® Гидро+ - это увлажняющий стерильный офтальмологический раствор, не содержащий консервантов. В состав капель входит перекрестно-связанный натрия гиалуронат (0,2%), действие которого направлено на устранение симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также на защиту роговицы.

Состав: перекрестно-связанный натрия гиалуронат 0,2%, динатрия тетраборат декагидрат, борная кислота, натрия хлорид, вода для инъекций.

Перекрестно-связанный натрия гиалуронат придает раствору высокую вязкоэластичность, что обеспечивает высокую степень увлажнения глазной поверхности, а также долгосрочное облегчение симптомов «сухого глаза», как, например, боль, жжение, покалывание, ощущение песка, усталость глаз, тяжесть в глазах или слезящиеся глаза.

Для чего применяют Окутиарз® Гидро+?

Окутиарз® Гидро+ предназначен для облегчения симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также для защиты роговицы в качестве заменителя слезы, обеспечивая длительное увлажнение.

Может применяться также при ношении контактных линз для увлажнения глаз.

Окутиарз® Гидро+ полезен во время и после:

- длительного воздействия солнечного света
- воздействия кондиционирования воздуха
- длительного просмотра цифрового экрана
- контакта с очищающими средствами

Окутиарз® Гидро+ может также помочь облегчить дискомфорт после хирургической операции на глазах.

Как применять Окутиарз® Гидро+?

Для закапывания в глаз. Не глотать.

Рекомендуемый режим дозирования по 1-2 капли в каждый глаз один или несколько раз в день в соответствии с рекомендациями Вашего врача или фармацевта.


Перед открытием флакона вымойте руки и соблюдайте правила гигиены во время использования.

Избегайте контакта кончика флакона с поверхностью глаза.

1. При первом использовании флакона потяните и полностью удалите ленту-контроль первого вскрытия.



2. Аккуратно сожмите флакон и закапайте 1 каплю в глаз.
3. Плотно закройте флакон после использования.

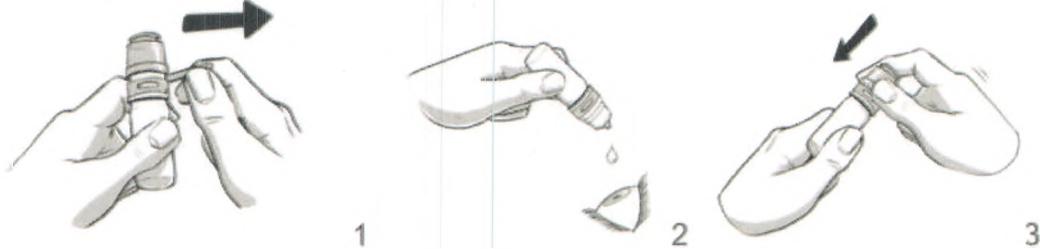

Противопоказания

Не применять при возникновении аллергической реакции или при повышенной чувствительности к любому из компонентов Окутиарз® Гидро+.

Побочные эффекты

Как и в случае применения других глазных капель, возможно появление слабого временного дискомфорта, связанного с инстилляцией продукта.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, СООБЩИТЕ О НИХ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

Как хранить Окутиарз® Гидро+

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

Защищать от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Не применять, если упаковка повреждена.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца.

Использовать в течение 90 дней после вскрытия флакона.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска: 1 флакон объемом 10 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Производитель:

OFFHEALTH S.P.A., Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze (FI), Италия

на заводе:

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L., Via Modena 15, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), Италия

Дистрибутор:

Santen Oy, Финляндия

(BY)

Представитель производителя на территории Республики Беларусь

Представительство компании Сантен АО, Финляндия в Республике Беларусь

Ул. Маяковского 144, 220028 Минск, Республика Беларусь

Тел.: +375 17 316 77 65

Электронная почта: santen@tut.by



Дополнительная информация в виде символов на упаковке

Символ											
Значение	Производитель	Дата производства	Номер серии	Годен до	Стерильно	Хранить при температуре не выше 25°C	Защищать от воздействия тепла и прямых солнечных лучей	Защищать от влаги	Перед применением прочитайте инструкцию по применению	Не применять, если упаковка повреждена	Соответствие требованиям Директив Европейского Союза и гармонизированных стандартов

