

НАЗНАЧЕНИЕ

Пластырь-повязка предназначена для лечения на начальной стадии ожоговых, гнойных, вялозаживающих, осложненных послеоперационных ран, трофических язв, свищей, пролежней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластырь-повязка представляет собой микропористый нетканый материал с нанесенным клеевым расплавом прямоугольной или закругленной формы с углеродной подушечкой, полученной в результате термической обработки гидратцеллюлозного материала, имеющей черную, гляцевую поверхность. Суммарная пористость углеродной подушечки составляет 0,6-0,8 см³/г и благодаря этому обладает значительной капиллярной активностью. Она активно сорбирует микробные тела и химические вещества, обладает дезодорирующим эффектом и малой адгезивностью. Материал нетоксичен и не вызывает неблагоприятных изменений в тканях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружно. Открыть пакет, вынуть пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную пленку (бумагу) и приклеить к сухой, чистой коже, прижимая края, чтобы углеродная подушечка несколько превышала размер раны или шва.

Использовать однократно. Заменять по мере необходимости.

Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

У некоторых больных возможен зуд кожных покровов и жжение в области наложения пластыря-повязки. В таких случаях смену пластыря-повязки производить через 4-8 часов или перейти на использование других типов повязок.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластырь-повязка выпускается в стерильном, готовом к использованию виде.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед использованием хранить в неповрежденной потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от света (прямых солнечных лучей) и обогревателей (на расстоянии не менее 1 метра) месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Срок годности пластыря-повязки – 5 лет от даты изготовления.