

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ИНСТРУКЦИЯ**по применению сорбента тканевого углеродного марки АУТ-М****НАЗНАЧЕНИЕ**

Сорбент тканевый углеродный АУТ-М предназначен для местного применения при лечении ожоговых ран, трофических язв, вялогранулирующих ран, свищей, гнойных полостей различной этиологии, осложненных послеоперационных ран.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сорбент тканевый углеродный АУТ-М представляет собой эластичную ткань черного цвета с глянцевой поверхностью, полученную в результате термической обработки гидратцеллюлозного материала. Суммарная пористость составляет 0,6-0,8 см³/г. Ткань обладает значительной капиллярной активностью. Она активно сорбирует микробные тела и химические вещества, обладает дезодорирующим эффектом и малой адгезивностью. Сорбент нетоксичен и не вызывает неблагоприятных изменений в тканях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кусочек стерильного сорбента, несколько превышающий размер раны, накладывается на область раневой поверхности, покрывается двойной марлевой салфеткой и фиксируется с помощью бинта или лейкопластыря. Продолжительность воздействия определяется степенью поражения и видом раны и, как правило, может колебаться от нескольких часов до двух суток. По истечении данного срока производится замена сорбента. Кратность перевязок неограниченна и производится до полной эпителизации раневой поверхности.

При лечении гнойных полостей материал вводится в виде турунды на 1 сутки с последующей заменой на новую (более частые замены турунды через 6-12 часов проводятся при обильном отделении гноя).

К клиническому применению без предварительной стерилизации допускаются только сорбенты, находящиеся в заводской упаковке с маркировкой «стерильно» при условии ее целостности, или сорбент, прошедший стерилизацию в условиях стационара непосредственно перед использованием. Для стерилизации вскрыть герметичную упаковку, извлечь из нее сорбент и стерилизовать автоклавированием при 120 °С и давлении 1,2 атм в течение 45 мин в соответствии с инструкцией 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения».

Категорически запрещается стерилизация сорбента в парах формалина.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

У некоторых больных возможен зуд кожных покровов и жжение в области наложения сорбента. В таких случаях смену сорбента производить через 4-8 часов или прекратить использование.

ФОРМА ВЫПУСКА

Сорбент выпускается в 2-х вариантах:

- стерильным, в готовом к использованию виде;
- нестерильным, требующим стерилизации в условиях стационара.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сорбент АУТ-М храниться в закрытых складских неотопляемых помещениях на поддонах или стеллажах. Сорбент АУТ-М не разрешается хранить совместно с органическими растворителями.

Гарантийный срок для нестерильного сорбента АУТ-М – 5 лет от даты изготовления.

Срок годности для стерильного сорбента – 5 лет от даты изготовления.