

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИМН «СВЕТОН», раствор для контактных линз всех видов (инструкция по применению размещается на пачке)

## Указания по применению

### Очистка

Тщательно помойте руки. Снимите контактную линзу и положите ее на ладонь. Капните небольшое количество (2-3 капли) раствора на линзу и слегка потрите подушечками пальцев 10-15 секунд.

### Ополаскивание

После очистки ополосните контактные линзы раствором для линз.

### Увлажнение

Если контактные линзы теряют свою влагу и вызывают неприятные ощущения, увлажните их раствором для линз.

### Хранение

Залейте в контейнер для линз свежий раствор. Поместите контактные линзы в контейнер для хранения таким образом, чтобы они полностью находились в растворе. Оставьте линзы на всю ночь или на срок не менее 6 часов. Контактные линзы надейте непосредственно из раствора без предварительного ополаскивания. После использования вылейте раствор из контейнера и ополосните его свежей порцией раствора для линз. Контейнер для хранения контактных линз всегда должен быть чистым.

## СОАО «ФЕРЕЙН»

Республика Беларусь, 220014,  
г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,  
тел./факс: +375 17 394-92-18,  
e-mail: office@ferane.by

## Основные рекомендации

- Носите контактные линзы и ухаживайте за ними, соблюдая указания врача офтальмолога.
- В случае появления неприятных симптомов (чрезмерное слезоотделение, покраснение глаз и др.) снимите контактные линзы и немедленно обратитесь к врачу.
- Не применяйте раствор для термической обработки контактных линз.
- Используйте раствор в течение 4 месяцев после вскрытия флакона.
- Не пользуйтесь раствором с истекшим сроком годности.

## Условия хранения

Храните раствор в плотно закрытом флаконе при температуре от 10 до 25 °С в недоступном для детей месте.

**Срок годности** - 2 года с даты изготовления.

**Состав:** хлорид натрия, борная кислота, глицерин, трилон Б, метилцеллюлоза водорастворимая или гидроксипропилцеллюлоза, тетраборат натрия, вода очищенная.

**Дата изготовления:**

**ТУ РБ 100120195.043-2002**

