

Инструкция по применению
изделия медицинского назначения

Фаринол (Farinol) спрей

Внимательно прочитайте всю инструкцию по применению, так как она содержит важную для Вас информацию.

Всегда используйте Farinol именно так, как описано в этой инструкции по применению или так, как сказал Вам врач или фармацевт.

Состав:

Рафинированное рапсовое масло, облепиховое масло (*Oleum Hippophaes*), масляный экстракт цветков календулы (*Oleum Calendulae*) и масло бергамота (*Oleum Bergamii*).


Действие и способ применения:

Farinol – средство, созданное на основе масел, натуральные масла в составе которого покрывают слизистую оболочку полости рта и горла. Это помогает поддерживать слизистую влажной и упругой, уменьшает ощущение дискомфорта и боль, уменьшает раздражающие ощущения в горле и трение, таким образом облегчая процесс глотания.


Средство используют для ухода за полостью рта и горла, для уменьшения раздражения слизистой оболочки рта и горла после различных манипуляций или в случаях воспаления.

Форма распыляющего устройства Farinol обеспечивает однородное попадание средства на слизистую оболочку и точную дозировку, в свою очередь, масляная основа покрывает слизистую оболочку, предотвращая проникновение новых инфекций.


Как использовать Farinol

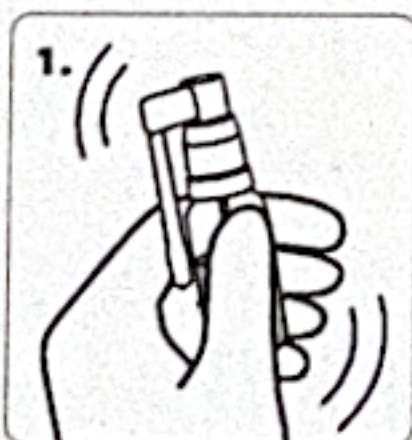

1. Возьмите в руку бутылочку и встряхните ее.

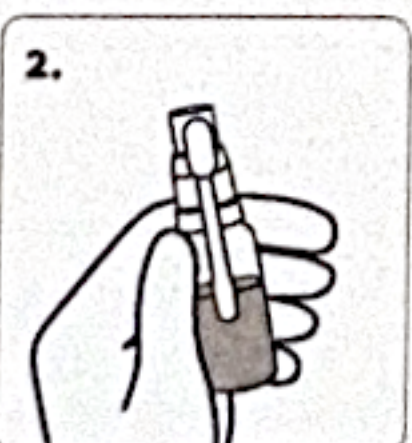

2. Направьте бутылочку распылителем к себе.

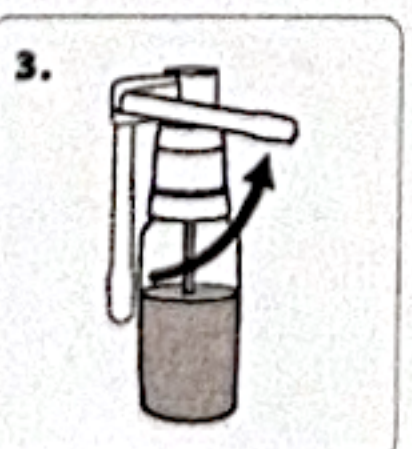

3. Поверните наконечник распылителя против часовой стрелки под углом в 90 градусов.



4. Поместите распылитель в рот, как показано на рисунке.

20BYv0

5. Распылите Farinol в полость рта, нажав на головку распылителя 2-3 раза. Держите бутылочку вертикально!

При нажатии на головку распылителя один раз распыляется примерно 200 мг средства.

6. После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и поверните наконечник распылителя в первоначальную позицию.

Средство предназначено для применения одним пользователем.

Использовать 3 раза в день. Желательно повторно распылять средство после еды или питья, чтобы восстановить слой, покрывающий слизистую оболочку полости рта и глотки.

Средство применяют до исчезновения симптомов болезни. Если симптомы (ощущение дискомфорта, боль в горле) не проходят после недели использования данного средства, следует проконсультироваться с врачом. Можно применять детям с 2 лет, детям до 6 лет применять под присмотром родителей.

Меры предосторожности при использовании:

Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к какому-либо компоненту продукта. Не допускать попадания средства в глаза! При случайном попадании средства в глаза, незамедлительно промыть глаза проточной водой и проконсультироваться с врачом.

Хранение:

Хранить в сухом, недоступном и невидимом для детей месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при комнатной температуре (15-25 °C). Не использовать после окончания срока годности, который указан на упаковке.

Важно:

После начала применения необходимо использовать в течение 3 месяцев. Внимание! При попадании на одежду могут появиться пятна.

Производитель:

ООО «НПК Биотест», г. Гродно, ул. Гожская, 2, Республика Беларусь, 230014

Производственная площадка:

ООО «SILVANOLS», ул. Курбада 2А, Рига, LV-1009, Латвия

Упаковка:

бутылочка объемом 20 мл с распылителем.

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории Республики Беларусь:

ООО «НПК Биотест», г. Гродно, ул. Гожская, 2, Республика Беларусь, 230014, 80152- 60-99-08

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУШ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НПК Биотест»
ГРОДНО

руководитель
начальник отдела

Project	Farinol_spray_20BYv0		Fonts size	Non-varnished zone	Design	
Date	20.10.2023				Verified	
Scale	100% (M 1:1)				Verified	
Colour mode	PANTONE				Confirmed	
Type	Leaflet	Black C			Confirmed	
Original size	60 x 330 mm					